



FIAME

FIAKAL, c'est le pansement auto-adhésif unique pour une application rapide, simple et sûre comme: compresse, bandage ou attelle.

Ne colle pas à la peau, aux plaies et aux poils. Il se retire donc sans douleur puisqu'il n'adhère qu'à lui-même.

Hémostatique : arrête les hémorragies légères (sauf cas d'hémophilie).

Résiste à l'eau et aux corps gras.

N'adhère pas aux surfaces non organiques et par conséquent il ne retient pas les poussières ou les particules indésirables sur ou à proximité de la zone à protéger.

Microporeux, il respecte les fonctions physiologiques de la peau tel que la respiration et la transpiration .

N'infirme pas la faculté de mouvement des articulations grâce à sa souplesse.

Ne laisse pas sur la peau des particules adhésives lorsqu'on l'enlève.

Épouse les formes anatomiques


N'irrite pas et ne démange pas : Anti-Allergique

Biodégradable

En longueur de 2 mètres

Largeur standard de 35mm

Emballé individuellement sous papier cellophane et dans 1 boîte.

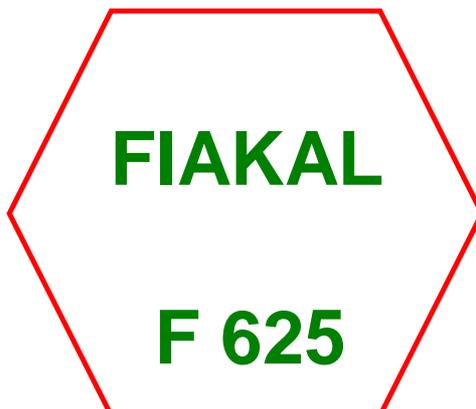

Composé de gaze coton codex (100% hydrophile),

De pur latex de Malaisie,

D'éther sulfurique et de colorant alimentaire

Doigtier (légère coupure, éraflure, brûlure, ampoule, etc....

Podologie

Compresse ou attelle

MODE D'EMPLOI

Enlever les 2 papiers protecteurs. Appliquer une extrémité du bandage à côté de la blessure et ensuite enrouler autour du membre (doigt, orteil...) en repassant la bande sur elle-même et former ainsi un manchon protecteur.

